

NutriLAB Anleitung Messvorgang

Patientenvorbereitung

Patient anleiten, auf Toilette zu gehen (leere Blase für die Messung)

Aktuelles Gewicht messen

Rechter Schuh und Socke abziehen

Patient liegend, Arme und Bein leicht auseinander (vgl. Anzeige Nutrilab)

Elektroden an der rechten Hand und an rechten Fuss anbringen

Vor jeder Messung:


Gerät testen mit Dummy

1. Dummy am Gerät einstecken
2. Gerät einschalten – Software startet auf (Checks)
3. «Starten» anklicken > Messung erfolgt automatisch
4. Messwerte mit Dummy Angaben prüfen


Patientendaten erfassen
und Messung durchführen

Patientendaten erfassen

1. Icon  auswählen

2. «Gruppe» (Ein Zentrum=eine Gruppe) auswählen  und
öffnen 

Bei der ersten Messung oder bei Folgemessung auf einem anderen Gerät:

3.  Personendaten erfassen:
Name = EFFORT II
Vorname = Zentrumskürzel und 3 Zahlen,
Geschlecht
Geburtsdatum: 01.01.Geburtsjahr

4. Speichern 

Bei einer Folgemessung

5. Patient-ID suchen und auswählen
 6. Gewicht überprüfen, ggf. anpassen
 7. Clips anbringen, Kabel beim Gerät einstecken
-

8.  Test anfügen -  auswählen - «Start» wählen, Messung erfolgt automatisch

9. Gewicht überprüfen – Speichern 

10. Die wichtigsten Messergebnisse sind dann direkt sichtbar

Anmerkungen

- unbedingt AKERN Elektroden verwenden!
 - Elektroden bis 3 Monate nach Abbruch verwendet werden. Bitte Abbruchdatum auf dem Beutel schreiben
 - Gerät nach jeder Messung laden! Die Zeit bis zur vollen Akku-Ladung beträgt etwa 4 Stunden. ACHTUNG es ist nicht möglich, gleichzeitig das Gerät zu laden und eine Messung durchzuführen!
-